

— 歯科医師考案 —

一般医療機器：口腔・嚥下機能訓練器具  
医療機器届出番号：13B3X10185000067

# キープアップケア

舌トシで、口腔・嚥下機能改善

— 簡単なカスタマイズで、らくらく口腔・嚥下トレーニング —



日・米特許取得

形状特許 特許4360688号

**オーラルフレイル対策**

- 小児のMFTに
- 発音・発声トレーニング
- 耳抜きトレーニング ets

# ハンズフリーで、いつでも舌トレ

## キープアップケアとは

強化、運動指導しにくい口腔・嚥下機能をトレーニングする器具



- ①突起部 (舌尖誘導部)
- ②斜面部 (舌挙上関連筋群強化部)
- ③咬合面部 (咬合高径増加による嚥下強化部)
- ④前歯部 (口唇閉鎖による口輪筋強化部)
- ⑤内面板 (垂直舌筋、横舌筋強化部)

## キープアップケアの6つの特徴

1. 柔らかい素材 (EVA樹脂・熱可塑性) を使用
2. ハンズフリーで、嚥下運動に準じた舌筋群をトレーニング
3. お湯で、簡単にカスタマイズで多様な口腔環境に対応
4. 咬合部を噛むことで、咀嚼筋群をトレーニング
5. お口を閉じて、口周りの筋群のトレーニング
6. 発音・発声及び耳抜きトレーニング

## 使用方法

上顎に装着し、突起に舌先をつけたままで斜面板を舌全体で押し上げる

装着したまま「だ液」を飲みこみ嚥下を繰り返す

継続・習慣化してもらうことが、ポイント

## 種類 (硬さ・軟化温度)

**スタート (60°C以下)、ソフト (70°C以下)、ミディアム (80°C以下)**

**色: スタートのみ選択可・・着色の有無**