

傷跡改善シリコンジェルシート

エピダーム  
EPI-DERM™

● 効果的な傷マネージメントが期待できることから、多くの医療機関で使われているシリコンジェルシート。傷跡や手術痕、ケロイドなどの赤みや盛り上がり部分等のケア用としてお使いいただけます。シリコンの膜が傷をやさしく包み、傷跡のかゆみや違和感の軽減が期待できます。本品は洗って繰り返しお使いいただけます。



禁忌・禁止

開放創や発疹等の皮膚病変が見られる場合には使用しないこと。

商品バリエーション

\*価格は全て税別表示です。

エピスタンダード 1枚入り  
クリア

希望小売価格 ￥9,800  
サイズ：12 x 14.5 cm

エピタブ (四角形) 6枚入り  
クリア

希望小売価格 ￥4,500  
サイズ：3 x 3 cm

エピCストリップ 1枚入り  
クリア

希望小売価格 ￥3,800  
サイズ：3.6 x 15 cm

\*帝王切開や乳房切除などに

外観



\*台紙を剥がすと透明の装着シートになります。

装着例



使用方法

1. 使用前に傷あとを洗いよく乾かす。
2. 必要であれば傷跡の大きさに合わせてカットしてから、本品をライナー (透明の台紙) から剥がして使用する。
3. 更に薄いフィルム (ピンク) を剥がして、粘性のある面を傷あとを完全にカバーするように貼付する。

使用例：ケガ / やけど / 手術 / ニキビ等で出来た傷あとと全般 / ケロイドなどの赤みやかゆみなどに

\* 繰り返し使えます (劣化したら取り替えてください。) \* 24時間連続使用が理想的ですが、難しい場合は少なくとも12時間以上、1週間から2週間使用してください。12時間ごとに一旦剥がして、傷あとと本品を洗浄、完全に乾燥してからまた貼付してください。就寝中に使用される場合には、はがれないように医療用テープなどで固定することをお勧めいたします。部位によってはサポーターや包帯などで固定してください。

使用上の注意

●かぶれ、かゆみ等の異常が発生した場合は直ちに使用を中止してください。テープによる、かゆみ等がでた場合は包帯やサポーターに替えてください。●治っていない傷 (炎症をおこしていたり、傷口が完全にふさがっていない状態の箇所) には絶対に使用しないでください。抜糸後、又はかさぶたが取れた傷あとに使用できます。●常に清潔な状態で使用ください。本品が汚れたらぬるま湯やベビーソープなどの弱酸性石鹸で洗い、よくすすいで自然乾燥した上、使用してください。●乾かす際にタオルやティッシュ、レンジやドライヤーは使用しないでください。●固定テープによる締めつけ過ぎにご注意ください。●誤って口に入れないよう、お子様やお年寄りの手の届かない場所に直射日光を避けて保管してください。●新しい傷ほど目立たなくなりやすい傾向にあります。傷あとの状態にもよりますが、おおよそ8週間から12週間が改善の認められる目安になります。