

クリーンアタック

貴金属用酸洗浄剤

使用方法

- ① 貴金属の酸化膜の除去にご使用ください。
- ② 添加剤と本剤の混合比を間違わないでください。
(本剤と添加剤を全て1.5%の水に溶かしてください粉末が残留しても一晩放置すれば完全に溶解します。)
- ③ 60℃程度に温度を上げると洗浄効果があがります。
- ④ 超音波洗浄器を使用されると短時間で酸化膜が落ちます。

特徴

- ① 抜群の経済性(安価、長寿命)
- ② 劇物、毒物ではないため安心してご使用頂けます。
- ③ 金合金からパラジウム合金まで幅広くご使用頂けます。
- ④ 従来品と比較して洗浄時間短縮されます。
- ⑤ 陶材焼き付け用金属の酸化膜除去の場合は付属スポイトで塩酸を数滴加えてご使用頂けます。

500ccが3本作れて
¥2,500



セット内容 本剤 140g
 添加剤 22.5g
計量スプーン、スポイト 付き

ご使用者のご意見

- ① 洗浄力が落ちずに長期間使用できる。
- ② トータルコストが非常に安い。
- ③ フッ酸などが入っていないので安心
- ④ 塩酸を滴下すると洗浄力があがる。

ご注意

- ① 毒物、劇物ではありませんが、直接手触れないでください。
- ② もし目に入ったときは十分な水で洗い流してください。
- ③ 酸性度の高いものです、排水の時は中和してから排水してください。

発売元 有限会社 アトミック
大阪府摂津市千里丘4丁目11番14号
お問い合わせ 06-6330-0428