

歯みがき

汚れを拭き取りしっとり保湿

口腔ケア さわやかウエットシート

コットン
100%



「口腔粘膜刺激性試験」を実施しています。

製品特長

- コットンメッシュシートを採用
拭き取ることでお口のなかの汚れをやさしくキャッチ
- 保湿成分配合でお口のなかをしっとり保湿
- ノンアルコールタイプ
- キシリトール配合(甘味剤)

こんなときに

- お口のなかの清浄に
- お口のなかの乾燥が気になる時に
- お水がない時の歯みがきに



シートサイズ
150mm×200mm

メッシュタイプ

60枚入
ノンアルコール

販売名：デンタルケアウエットシートA

成分：水(基剤)、グリセリン(湿潤剤)、PG(湿潤剤)、BG(湿潤剤)、ソルビトール(湿潤剤)、キシリトール(甘味剤)、メチルパラベン(保存剤)、エチルパラベン(保存剤)

内容量：60枚(薬液 約162mL/個)

MADE IN JAPAN

口腔ケアとは？

「口腔ケア」とは、口腔内のケアをすることでQOL(クオリティ・オブ・ライフ=生活の質)を高め、全身の健康維持を目的としています。主に次のようなことがあげられています。

・むし歯、歯周病の予防・口臭の予防・誤嚥性肺炎の予防・唾液分泌の促進・口腔機能の維持、回復につながる

※ただし、本製品はあくまで口腔内の清浄を目的としておりますので、これらの病気の予防等との因果関係が証明されたわけではありません。

【用途】

口腔内(歯・歯肉・舌・内頬など)の拭き取りに

【使用方法】

取出口シールを開け、シートを1枚ずつ取り出し、口腔内を拭き取ります。シートを指に巻いて使用いただくことで、口腔内を拭き取りやすくなりますが、要介護状態にある方に使用される場合、指を噛まれてしまうことがあります。ご注意ください。

※シートに黒や黄色の小さな斑点状のものが見られることがありますが、これは綿花の果皮や種子の一部ですので安心して使用いただけます。



【使用上の注意】 ※使用前に必ずお読みください。

- 口腔内に異常がある場合には使用しないでください。
- 使用中および使用後に赤み・かゆみ・刺激などの症状が現れた場合は、直ちに使用を中止して専門医に相談してください。
- 清潔な手で使用してください。
- シートおよび液を飲み込まないでください。
- 口腔内の拭き取り以外には使用しないでください。
- 一度使用したシートは再使用しないでください。
- シートは水に溶けません。トイレに流さないでください。
- 乾燥をさけるため、使用後は取出口シールをきちんと閉めてください。
- 開封後はなるべく早めに使用してください。

【保管上の注意】

- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光を避け、涼しい所に保管してください。



4 560430 410108

商品規格

入数(枚)	60
製品サイズ(mm)	W約111×D約88×H約54
製品重量(g)	225
ケース入数(個)	30
ケースサイズ(mm)	W270×D228×H280
ケース重量(g)	7,100
荷姿(合)	1
登録コード	
JANコード	4560430 410108
ITFコード	14560430 410105

株式会社 **ニッパ**
東京都台東区上野5丁目25番17号
TEL 03(3836)4811(代)

製造販売元

丸三産業株式会社

〒795-8508 愛媛県大洲市徳森1349番地

お客様相談室 TEL: 0893-25-1486

受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00

(土・日・祝日を除く)