

スーパーインテリアワックス

用途

クラウン内面のコーピング、ホストの細かい部分、インレー

特徴

- ① 柔らかい上に復元性を持っています。
- ② アンダーカットがあった場合や屈曲したホストでもちぎれずに引き抜くことができます。
- ③ 印したマージンラインも確認でき、乗せたワックスの厚みも確認できます。
- ④ 石膏模型にまわりつくようにフィットします。
- ⑤ 収縮の非常に少ないワックスです。

使用方法

- ☆ このワックスでクラウンの内面、インレーの内面を薄くコーピングします。
- ☆ あまり温度を上げすぎると収縮が大きくなるためデベリングは避けて下さい。

試験成績	溶解温度	短縮率			
		25℃	30℃	35℃	40℃
スーパーインテリアワックス	53℃	0.07	0.48	1.30	4.08



幻の名品広告に初登場！
抜群のフィット感

販売元 有限会社 アトミック
 大阪府府摂津市千里丘 4-11-14
 製造元 株式会社東洋化学研究所
 製造販売元
 東京都板橋区板橋 4-25-12

一般名症: 歯科材料 07 歯科用ワックス

届出番号 13B2X00026号 一般医療機器

容量 30g 医院価格 ￥1,980

他社インレー、マージンワックス比較

メーカー名	商品名	凝固温度(℃)	加圧短縮率(%)			
			25℃	30℃	40℃	45℃
A	GIYS	57.0		0.50	75.4	87.1
A	GIYM	57.2		0.10	23.7	82.0
A	GIYH	60.6		0.10	1.10	56.9
A	GIYMN	60.6		0.30	37.5	78.2
東洋化学	スーパーインテリアワックス	53.0	0.07	0.48	4.08	

ユーザー様の意見
 模型から浮き上がることがない
 ロングスパンの変形が抑えられる
 マージンを締め直す必要がない
 シャープなマージンでもちぎれない
 絡みつようなフィット感